

# Limpieza y esterilización de PAL-650

## LIMPIEZA (CAP ENCENDIDO)

- ▶ Conectar CAP-600E o el cable para evitar que entre líquido.
- ▶ Frotar con un cepillo blando, agua tibia y detergente suave. Luego aclarar.
- ▶ *No sumergir en el agua. No colocar la nariz de la pieza bajo el chorro de agua.*



## ESTERILIZAR (CAP APAGADO)

- ▶ Retirar CAP-600E o el cable para que el vapor pueda penetrar en la pieza.
- ▶ Para evitar la corrosión y para asegurar un funcionamiento adecuado, es necesario un ciclo de secado completo.
- ▶ Enfriar lentamente a temperatura ambiente. *No poner la pieza en marcha mientras esté caliente.*
- ▶ Hacer una inspección cuidadosa para asegurarse que la humedad se eliminó completamente.\*



Tiempo de exposición (ciclo completo)



Temperatura



Tiempo de secado



Inspeccionar

Desplazamiento por gravedad

**30** minutos  
(35 minutos en una caja)

Esterilización al vacío

**3** minutos

**132 – 135 °C**  
(270 – 275 °F)

**134 – 137 °C**  
(273 – 279 °F)

**8** minutos como mínimo

**8** minutos como mínimo



Humedad visible - No utilizar



Instrumento seco - Listo para usar